

Wie ein LINAK® Wireless LIFT40+™ gekoppelt wird




Bewegen Sie sich in einem Umkreis von zwei Metern um den Patientenlifter.



Rufen Sie den Direktkopplungsmodus auf, indem Sie die Taste 1 und den Magneten 3 Sekunden lang betätigen.



Lassen Sie die Taste und den Magneten los und bewegen Sie sich näher an den LIFT40+™ heran, bis die Summerfrequenz von langsam auf schnell wechselt.

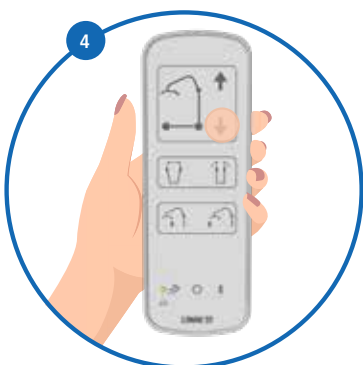

Bestätigen Sie die Kopplung durch Drücken der Taste 1.



Doppelter Bestätigungs-Piepton - Kopplung OK

Wie man koppelt