


Wie man einen LINAK® Wireless LIFT50™ koppelt

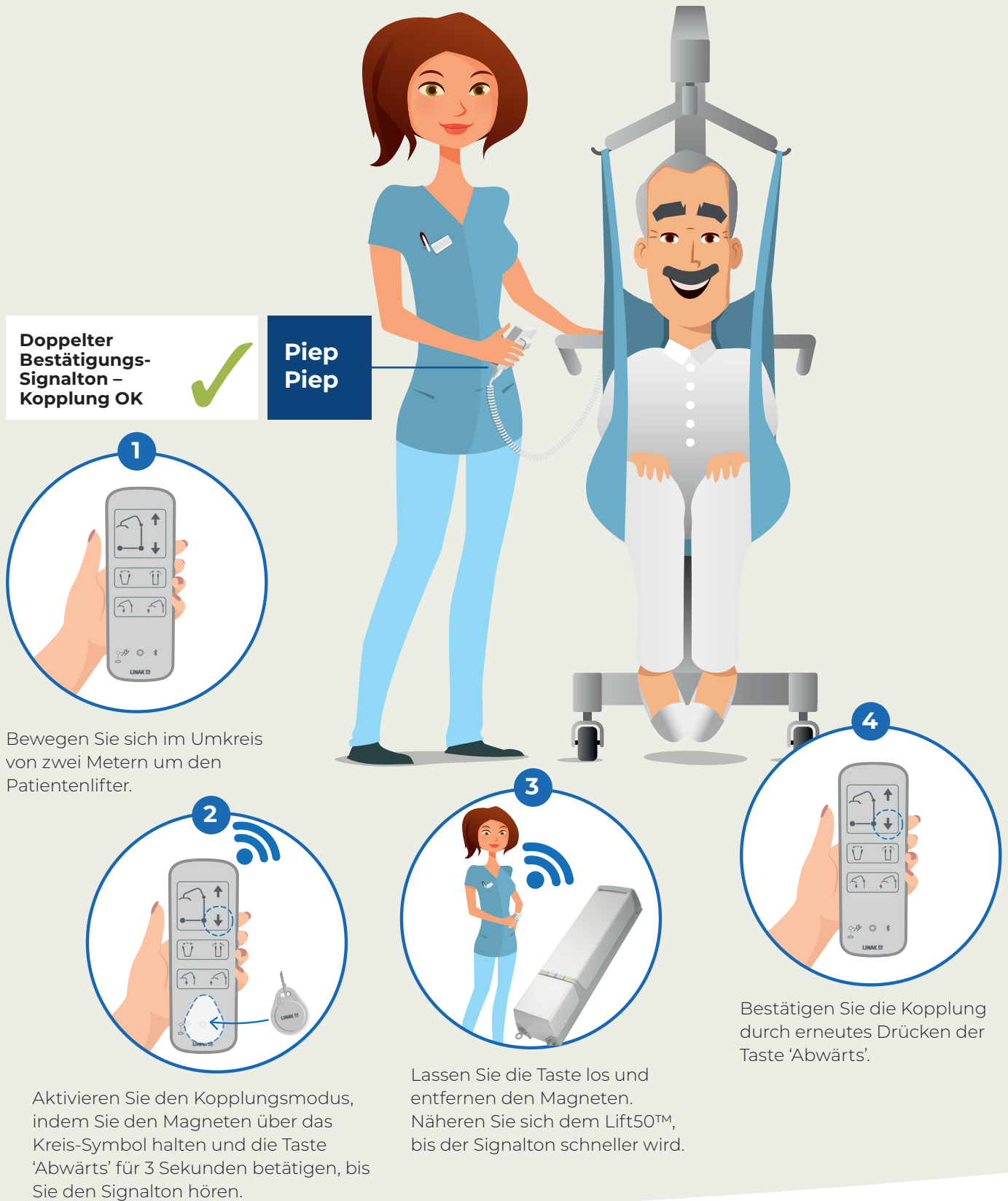


Doppelter
Bestätigungs-
Signalton –
Kopplung OK



Piep
Piep

1

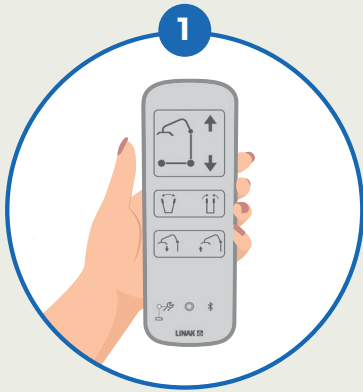

Bewegen Sie sich im Umkreis
von zwei Metern um den
Patientenlifter.

2




Aktivieren Sie den Kopplungsmodus,
indem Sie den Magneten über das
Kreis-Symbol halten und die Taste
'Abwärts' für 3 Sekunden betätigen, bis
Sie den Signalton hören.

3



Lassen Sie die Taste los und
entfernen den Magneten.
Näheren Sie sich dem Lift50™,
bis der Signalton schneller wird.

4

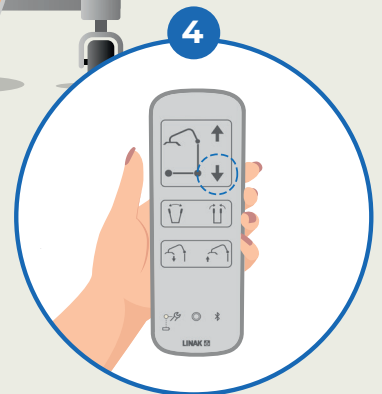

Bestätigen Sie die Kopplung
durch erneutes Drücken der
Taste 'Abwärts'.