



Under Bed Light UBL2 Scheda tecnica

UBL2

UBL2, Under Bed Light 2, è una luce di cortesia che fornisce un'ottima intensità di luce ed una distribuzione ottimale. E' sviluppata principalmente per letti ospedalieri e di cura, riducendo il rischio di cadute accidentali durante le ore notturne.

Utilizzando la luce di cortesia con una pulsantiera LINAK e centralina di controllo OpenBus™, Under Bed Light offre i seguenti benefici:

- Due intensità di luce disponibili
- Connessione di una pulsantiera direttamente nell'unità UBL2
- Classe di protezione: IPX6 o IPX6 Washable DURA™
- È possibile integrare UBL2 all'interno di sistemi già esistenti senza occupare porte supplementari nella centralina
- Semplice accesso al dispositivo Service Data Tool (SDT)



Caratteristiche:

- Intensità luce: fino a 11 Lux
- Gradazione: luce calda (Kelvin 2900 +/- 50)
- Durata LED: 50,000 ore (max. intensità)
- Cavo: connettore modulare RJ45 a 6 fili
- Classe di protezione: IPX6, IPX6 Washable DURA™
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Vetro satinato
- Grado di estinguenza: UL94 classe V2
- Programmabile dall'esterno: si
- Consumi di corrente:
HW tipo 00:
 - Vbus 8V < 1 mA
 - Vper 40V < 5 mAHW tipo 01:
 - Vbus 8V < 1 mA
 - Vper 40V < 10 mA

Utilizzo:

- Temperatura d'esercizio: da +5°C a +40°C
- Temperatura di stoccaggio: da -10°C a +50°C
- Umidità relativa: da 10% a 80% a +30°C no condensa
- Pressione atmosferica: da 700 a 1060hPa
- Approvazioni: EN62471, IEC60601-1:2005, 3rd edizione (in fase di approvazione)

Descrizione:

UBL2 è disponibile in 2 versioni: HW tipo 00 'senza microprocessore' e HW tipo 01 'con microprocessore'.


HW tipo 00: scegliendo questa versione senza microprocessore, la luce è sempre attiva.

HW tipo 01: scegliendo la versione con microprocessore, si ha la possibilità di attivare e disattivare UBL2 tramite pulsantiera oppure quando riceve un bit dalla centralina OpenBus. È possibile inoltre regolare l'intensità della luce.

Entrambe le versioni possono essere ordinate come standard in 2 intensità di luce differenti, indice 20 e 60.

UBL2 con intensità 20 è da utilizzarsi quando si necessita della luce su ciascun lato del letto. UBL2 con intensità 60, se si desidera posizionare la luce nella parte inferiore del letto.

Dimensioni:

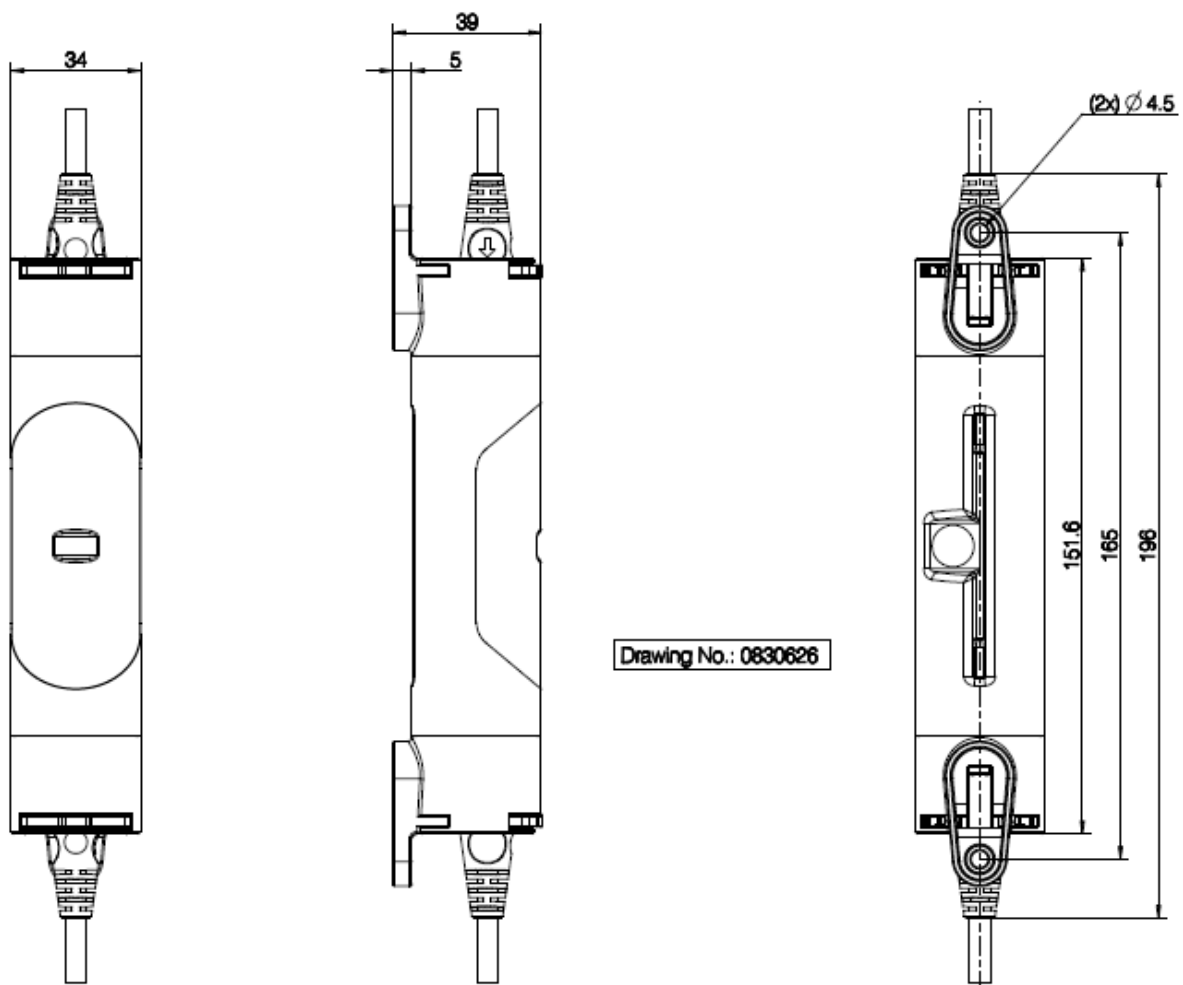

Drawing No.: 0830626

Drawing no.: 0830626

UNDER BED LIGHT 2

Esempio d'ordine:

U B L 2 0 0 0 0 0 0 W - 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0		<p>Non utilizzato 0 = Nessuno</p> <p>Non utilizzato 0 = Nessuno</p> <p>Non utilizzato 0 = Nessuno</p> <p>Non utilizzato 0 = Nessuno</p> <p>Non utilizzato 0 = Nessuno</p> <p>Non utilizzato 0 = Nessuno</p> <p>Non utilizzato 0 = Nessuno</p> <p>Non utilizzato 0 = Nessuno</p> <p>Struttura 2 = 2 porte</p> <p>Montaggio 0 = Con viti</p> <p>Colore 2 = Grigio</p> <p>-</p> <p>Grado IP 6 = IPx6 W = IPX6 Washable DURA™</p> <p>Funzionalità 020 = Vedere descrizione 060 = Vedere descrizione</p> <p>Non utilizzato 0 = Nessuno</p> <p>HW 00 = Senza microprocessore 01 = Con microprocessore</p> <p>Non utilizzato 0 = Nessuno</p> <p>Versione 2</p> <p>Comando UBL</p>
--	--	--

LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
 E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con
 l'applicazione prevista. LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da
 garanzia se prontamente resi.
 Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl
 Via del Commercio, 27
 20090 Buccinasco (MI)
 T. 02 48 46 33 66
 F. 02 48 46 82 52
 info@linak.it
 www.linak.it